




Доктор Джэк Ливайн - Заслуженный руководитель отделения ортопедической хирургии, Медицинский Центр Брукдэйл, Нью-Йорк, Нью-Йорк.

Доктор Ливайн предлагает полный спектр качественных магнитных товаров.

- + товары обеспечивают поддержку, стабильность, комфорт и что наиболее значимо – воздействие магнитов.
- + Помогают снять напряжение и улучшить кровообращение.
- + товары подходят для всех размеров и не видны под одеждой.

Инструкции по использованию магнитной коленной ленты

Лента, разработанная и запатентованная ортопедическим хирургом, доктором Джэком Ливайн, широко обсуждалась в ведущих медицинских журналах. Но важнее то, что тысячи людей попробовали ее, и им понравилось – лента представляет собой легкий браслет, охватывающий коленный сустав под коленной чашечкой. (См. рисунок)

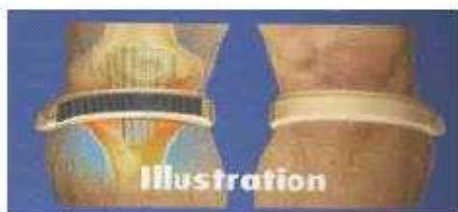

Она преобразует движения надколенно-бедренного сустава путем поддержания коленной чашечки снизу без ограничения ее подвижности. Лента позволяет Вам двигаться свободно.



1. Наденьте ленту стрелкой вверх прямо под коленной чашечкой. Запечатанная сторона ленты должна прилегать к коже. Убедитесь, что верхний край ленты расположен прямо по коленной чашечкой. (См. фото)
2. Проденьте тонкий конец ленты через металлическое кольцо. Оттяните плотно и застегните.
3. Не затягивайте ленту слишком туго.
4. Не носите ее во время отдыха и снимайте во время сна.

УХОД: Чистка: Протрите влажной тряпкой.

ВНИМАНИЕ: Магниты неприемлемы для людей, использующих кардиостимуляторы, автоматический дефибриллятор, инсулиновые помпы, а также при прохождении лекарственных терапий или во время беременности. Не использовать на открытые раны.

ОСТОРОЖНО: Данный товар содержит магниты. Остерегайтесь прямого контакта с компьютерами, дисками, аудио- и видеолентами и другими магнитными накопителями.